

koncentrirani aldehidni dezinficijens vrlo širokog spektra, visoke razine, za medicinske proizvode i druge površine i opremu, s odličnim svojstvima čišćenja

S NAJNIŽOM KONCENTRACIJOM GLUTARALDEHIDA U RADNOJ OTOPINI: 0,02 - 0,27%

POTPUNI VIRUCID, SPORICID, STERILANT

MEDICINSKI PROIZVOD I BIOCIDNI PRIPRAVAK



INDIKACIJE • dezinfekcija širokog spektra i istodobno čišćenje površina, opreme i pribora u prostorima visokog rizika, gdje se zahtijeva dezinficijens visokog stupnja, uz dobre učinke pranja i deodorizacije; posebno učinkovit u dezinfekciji prostora zamagljivanjem!!

SASTAV • koncentrirana otopina: 8% glutaraldehida, 5% benzalkonij-klorida, 3% didecil-dimetil-amonijskog klorida
• radna otopina: 0,02 - 0,27% glutaraldehida

OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST

- baktericid: 1,5% 5 min /*M.tb* 1% 60 min./, sporicid /*C.difficile*/: 3% 30 min, virucid: 0,5% 5 min /*HBV, HCV, adeno, rota*/, potpuni virucid: 2% 15 min uz visoko organsko opterećenje, 0,5% 5 min uz nisko organsko opterećenje /*noro*/; 2% 60 min /*polio*/; fungicid
- idealan za velike površine u prostorima visokog rizika, npr. OP salama, intenzivnoj njezi, hemodijalizi, laboratorijima, izolacijama, patologiji, posebno prikladan za veterinu /peradarstvo/
- sinergističko antimikrobno djelovanje glutaraldehida i dviju kvarternih amonijskih soli
- kratko kontaktno vrijeme: 5-15 min
- dezinficira, čisti i deodorira, upotrebljava se prskanjem ili prebrisivanjem, ekonomičan

Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici i informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim sustavom osiguranja kvalitete DIN ISO 9001:2008, DIN 13485 i GMP firme ANTISEPTICA GmbH, provjereni putem neovisne institucije VAH prema kriterijima EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42 EC CE 0124, te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, HR
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA

koncentrirani aldehidni dezinficijens vrlo širokog spektra, visoke razine, za medicinske proizvode i druge površine i opremu, s odličnim svojstvima čišćenja

SVOJSTVA I DJELOVANJE: Koncentrirana otopina, bistre plave boje, osebujna, aromatična mirisa. Dezinficijens najšireg antimikrobnog spektra i visoke razine, sinergističkog djelovanja glutaraldehida i dviju kvarternih amonijevih soli, koje istodobno osiguravaju i odlična svojstva čišćenja. Iznimno brzo i u niskim koncentracijama djeluje na bakterije, bakterijske spore, gljive; potpuni virucid; ne interferira sa sapunima i proteinima, niske toksičnosti, ekološki prihvatljiv, ekonomičan

SASTAV: 100g koncentrirane otopine sadržava: 5.0 g benzalkonij-klorida, 3.0 g didecil-dimetil-amonijevog klorida, 8 g glutaraldehida; 0,02 - 0,27% glutaraldehida u radnoj otopini

INDIKACIJE: dezinfekcija širokog spektra i čišćenje površina, opreme i pribora u prostorima visokog rizika, naročito medicinskih proizvoda, te drugih površina i predmeta; posebno učinkovit u dezinfekciji zamagljivanjem u peradarstvu

KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na osnovne sastojke

MJESTO PRIMJENE: podovi, zidovi, namještaj, oprema, naročito u odjelima visokog rizika /jedinice intenzivnog liječenja, OP sale, hitna pomoć, laboratorij i sl./

NAČIN UPORABE: COMBI surface se rabi razrijeđen vodom, a radne otopine pripremaju se prema tablici:

UPUTA ZA UPORABU / test	KONCENTRACIJA	KONTAKTNO VRIJEME
VAH-Dezinfekcija površina uz mehaničko djelovanje / DGHM standardne metode		
VAH-dezinfekcija površina: baktericid, fungicid čisti uvjeti	1%	5 min
	0.5%	15 min
	0.25%	60 min
VAH-dezinfekcija površina: baktericid, fungicid nečisti uvjeti	1.5%	5 min
	1.0%	15 min
	0.5%	30 min
	0.25%	60 min
tuberkulocid nečisti uvjeti	4.0%	30 min
	1.0%	60 min
DVV / RKI Smjernice- virucidno djelovanje*		
virucid* - inaktivacija virusa s ovojnicom (uklj. HIV / HBV / HCV)	1.0%	15 min
vacciniavirus	1.0%	15 min
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus) / HCV	0.25%	15 min
virucid*- inaktivacija ovijenih i neovijenih virusa	2.0%	60 min
poliovirus	2.0%	60 min
adenovirus	0.5%	5 min
SV40 (Simian-Virus 40)	1.0%	5 min
	0.5%	15 min
rotavirus	0.5%	5 min
EN 14476 - virucidno djelovanje		
norovirus FCV (feline calicivirus) čisti uvjeti	0.5%	5 min
	0.25%	60 min
norovirus FCV (feline calicivirus) nečisti uvjeti	2.0%	15 min
	1.0%	30 min
EN 13740 - sporicidno djelovanje		
Sporicid (<i>C.difficile</i>) - nečisti uvjeti	3.0%	30 min

*prema RKI preporukama, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Fiksne površine se prebrišu radnom otopinom, a pribor i predmeti se mogu uroniti u radnu otopinu COMBI surface.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati pri temperaturi do 25 °C podalje od dohvata djece

OPREMA: 6 x 2 L, 2 x 5 L, karton s 100 vrećica a 20 ml, zatvarač za doziranje 2l, pumpica za kanister 5 L

REGISTRACIJA: Broj i datum Rješenja o upisu u Očevidnik medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i med. proizvode: UP/I-530-09/09-05/270 od 17.07.2009.; broj i datum Rješenja MZ RH o upisu u Registar biocidnih pripravaka: UP/I-543-04/12-05/305 od 27. ožujka, 2013.

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Dr.H-J. Molitor GmbH, D-50259 Pulheim, Njemačka / EU, proizvedeno sukladno standardu EN ISO 9001 i DIn ISO 13485.

Made in Germany/EU



ANTISEPTICA

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, HR
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr