

Oxygenon® Liquid* r.f.u. (gotov za uporabu)



dezinficijens s aktivnim kisikom za medicinske proizvode, površine i opremu visokog rizika
-visoke ekološke kategorije i najvišeg stupnja djelotvornosti

AKTIVNI KISIK / VODENA OTOPINA / BIOCID

*Oxygenon® Liquid r.f.u. je internacionalno ime njemačkog proizvoda Descogen® Liquid r.f.u.

POTPUNI
virucid,
sporicid

Područja primjene:

Obzirom da su sporigene bakterije u svijetu sve više rasprostranjene, dezinficijensi sa sporicidnim učinkom imaju sve značenje. Za razliku od aldehida i klorinih spojeva, kemijski spojevi koji otpuštaju aktivni kisik su ekološki dezinficijensi izbora za površine; biorazgradivi su, ne ostavljaju nikakve rezidue i imaju neutralan miris.

Oxygenon® Liquid r.f.u. s aktivnim kisikom ima vrlo širok spektar djelotvornosti: baktericid (uklj. *M.tb*), fungicid, virucid i sporicid. Velike prednosti proizvoda su da je to **dezinficijens u tekućoj formi - gotov za uporabu i s osnovom aktivnog kisika**. To mu omogućuje brzu i komfornu primjenu. Preporučuje se u svim područjima s visokim rizikom od infekcija: u jedinicama intenzivnog liječenja, OP salama, odjelima za neonatologiju (za inkubatore) i opstetriciju, transplantaciju, opeklina, u izolacijama, hitnoj medicini, farmaceutskoj industriji, laboratorijima, fizioterapiji i rehabilitaciji, ambulantama opće prakse, javnom zdravstvu i institucijama, domovima za starije, i sl.

Posebne značajke:

- mogućnost korištenja Oxygenona® Liquid r.f.u. u sustavu impregnacije "suhih" maramica **A-wipes** (do 14 dana)

Uporaba, djelotvornost, kontaktna vremena:

Test	koncentracija	kontaktno vrijeme
VAH- DEZINFEKCIJA RUKU/ DGHM /EN STANDARDI		
VAH- dezinficijensi za površine: baktericid, uklj. djelotvornost na kvasce, s mehaničkim djelovanjem/ DGHM standardne metode, čisti uvjeti (ekvivalentno EN 13727 I EN 13624)	nerazrijeđen	30 min
Tuberkulocid, nisko organsko opterećenje (ekvivalentno EN 14348)	nerazrijeđen	60 min
RKI / DVV Smjernice – virucidna djelotvornost		
limitirani virucid* inaktivacija ovijenih virusa, uklj. HIV/HBV/HCV	nerazrijeđen	1 min
Vakcinija virus	nerazrijeđen	1 min
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	nerazrijeđen	1 min
potpuni virucid*	nerazrijeđen	30 min
Poliovirus	nerazrijeđen	30 min
Adenovirus	nerazrijeđen	1 min
SV40 (Simian-Virus 40)	nerazrijeđen	5 min
EN 14476 - potpuna virucidna djelotvornost		
Norovirus (MNV) ^a	nerazrijeđen	1 min
Rotavirus	nerazrijeđen	1 min
EN 113704 - sporicidna djelotvornost		
sporicid (<i>B. subtilis</i>), nisko organsko opterećenje	nerazrijeđen	30 min

*sukladno Preporukama RKI Bundesgesundheitsblatt 01/2004

^amurine Noro virus – surogat za humani Noro virus

- izvrsnost i praktičnost u uporabi
- vrlo širok spektar djelotvornosti
- bez toksičnih rezidua
- visoka podnošljivost materijala (uklj. osjetljivu plastiku i akrilno staklo)
- ugodan i neutralan miris, bez parfema i boja
- biorazgradiv

Uvršten na Liste dezinficijenasa provjerenih kvalitete kod nadležnih stručnih institucija i kod proizvođača medicinske opreme u Njemačkoj i Austriji:

- VAH
- ÖGHMP
- Dräger (za medicinske proizvode)

ANTISEPTICA

Proizvođač:

ANTISEPTICA "Dr.H-J.Molitor" GmbH, Pulheim, Germany i ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH, Wien, Austria



Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer:
ANTISEPTICA d.o.o.

Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, HR

Oxygenon® Liquid* r.f.u. (gotov za uporabu)

Način primjene:

Dezinfekcija površina raspršivanjem i prebrisavanjem uz mehaničko djelovanje

Dovoljnu količinu Oxygenona Liquid nanijeti na površinu raspršivanjem ili prebrisavanjem i mehanički ravnomjerno raspodijeliti po površini. Pripazite da cijela površina bude mokra tijekom preporučenog kontaktnog vremena.

Ako je to primjenjivo, površine se nakon dezinfekcije mogu obrisati tkaninom navlaženom čistom vodom kvalitete vode za piće (npr. ako se želi spriječiti lagano stvaranje kristaliničnih nakupina soli na površini). Onečišćenja površine, npr. krv ili drugi organski materijal, treba prije dezinfekcije ukloniti s površine tkaninom za jednokratnu uporabu natopljenom u dezinficijensu; tkanina se nakon toga na propisani način baci.

U kombinaciji sa sustavom

“suhih maramica” **A-wipes**: uz propisani postupak za “suhe maramice” **A-wipes**, koje se dezinficijansom natapaju u impregnacijskoj posudi ANTISEPTICA za **A-wipes**, Oxygenon Liquid r.f.u. može se koristiti do 14 dana. Daljnje informacije o ovom postupku pročitajte u prospektu za **A-wipes** kao i u preporukama VAH za korištenje “suhih maramica”.

Djelotvornost:

- baktericid (uklj. *M.tb*)
- sporicid
- fungicid (uklj. kvasce)
- **potpuni virucid** (ovijeni i neovijeni virusi)
- **sporicid**

Posebni savjeti:

- **Oxygenon Liquid r.f.u. je atestiran i preporučen za dezinfekciju medicinskih proizvoda firme Dräger**
- Za dezinfekciju nekih neplemenitih metala, kao npr. mjed, bakar i čelik, koji nije otporan na koroziju, Oxygenon Liquid r.f.u. nije prikladan. Uporaba na aluminiju samo je uvjetno dozvoljena i zahtijeva da se prije prve primjene podnošljivost provjeri na nekom neutralnom mjestu.
- Spriječite dodir s očima, kožom i sluznicama.
- Nosite prikladnu zaštitnu osobnu odjeću.
- Prije prve primjene Oxygenona Liquid r.f.u. ili nakon promjene dezinficijensa potrebno je površine, spremnike i pribor za čišćenje temeljito očistiti, isprati i/ili ukloniti ostatke prethodno korištenog dezinficijensa.
- Ne miješati s drugim preparatima, npr. s jakim lužinama i kiselinama.
- Tijekom rukovanja s biocidima pridržavajte se informacija o radu s opasnim kemikalijama; Pročitajte Sigurnosno-tehnički list.
- Osigurajte dobru provjetrenost prostora.
- Koristite biocide sa sigurnošću,
- Uvijek pročitajte informaciju o proizvodu, naljepnicu i uputu

Sastav:

100 g sadržava:
0.6 g karoata
(pentakalij bis/peroksimonosulfat/
bis/sulfata)

Fizikalna i kemijska svojstva:

Izgled: bistra, bezbojna tekućina
Miris: neutralan
pH vrijednost: ca. 2.5 kod 20°C

Način čuvanja:

Čuvajte zaštićeno od hladnoće, vrućine i izravnog sunčeva svjetla (kod 5°C-20°C)

Oprema:

10x 1L
2x 5L
Pomoćna oprema: ručni raspršivač

CE 0482

REGISTRACIJA: Biocidni proizvodi prema BPR: BauA Reg nr N-72008 (Njemačka);
Medicinski proizvod CE 0482, Obavijest Agenciji Halmed 2019.

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA “Dr.H-J.Molitor” GmbH, Pulheim, Germany i ANTISEPTICA chem.-pharm., Produkte GmbH, Wien, Austria
Proizvođač je certificiran prema standardima kvalitete EN 13485 i Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42/EEC.

Antisepsis by Antiseptica

Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer:



ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, HR
T +385 1 6214 790 • F+385 1 6226 952, E:info@antiseptica.hr • www.antiseptica.hr