


Triacid-N® r.f.u. / gotov za uporabu

dezinficijens brzog djelovanja, za čišćenje i dezinfekciju medicinskih proizvoda
osobito malih instrumenata, uključujući svrdla u stomatologiji

BEZ ALDEHIDA I ALKALIJA, DJELUJE VEĆ OD 5 MIN



INAKTIVIRA
M. tuberculosis i HCV
za 5 min

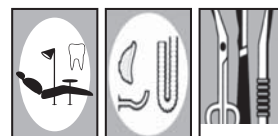

- INDIKACIJE**
- brza dezinfekcija i čišćenje malih instrumenata i medicinskih proizvoda
 - u dentalnoj medicini (za svrdla, diamante, gumeni pribor za poliranje, četkice, instrumente za korjenske kanale, ostali sitni stomatološki pribor)
 - za kirurški i nekirurški pribor i opremu od raznih materijala i sl.

- SASTAV**
- N-dodecilpropan-1,3-diamin i specijalni detergent za instrumente

OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST

- jednostavno rukovanje - NE RAZRJEĐUJE SE!
- ekonomična uporaba i precizno doziranje čak i u malim količinama
- pogodan za ultrazvučne kupelji
- odličan potencijal čišćenja
- visoka kompatibilnost s raznim materijalima
- bez aldehida i KAS
- medicinski proizvod MDD 93/94 IEC

CE 0124

Upotrebljavajte dezinficijense sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici i informaciju o proizvodu. Naši su dezinficijensi proizvedeni u skladu sa certificiranim sustavom osiguranja kvalitete ISO 9001, DIN ISO 13485 i GMP firme ANTISEPTICA GmbH, provjereni putem neovisne institucije VAH prema kriterijima EN standarda i registrirani sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima Republike Hrvatske.

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
T +385 1 6214 790 **F** +385 1 6226 952 **E** info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA



Quality Management
Medical Device
Directive 93/42/EEC



Quality Management
We are certified
according ISO 9001



Quality Management
We are certified
according DIN ISO 13485

Triacid-N® r.f.u. / gotov za uporabu

dezinficijens brzog djelovanja, za čišćenje i dezinfekciju medicinskih proizvoda osobito malih instrumenata, uključujući svrdla u stomatologiji

BEZ ALDEHIDA I ALKALIJA, DJELUJE VEĆ OD 5 MIN

SVOJSTVA I DJELOVANJE: bezbojna vodena otopina, nealdehidni dezinficijens jakog učinka za male instrumente, višestruke primjene, osobito u dentalnoj medicini, širok spektar djelotvornosti: baktericid, uklj. *M.tb.* (tuberkulocid) - atest VAH (5 min), levurocid, uklj. *C. albicans*, virucid, uklj. HBV/ HCV/ HIV/BVDV i vakciniju; ne boji materijale, ne otapa gumeni pribor za poliranje, veoma prikladan za ultrazvučne kupelji; jednostavan za rukovanje, ekonomičan, ugodna mirisa, odlične podnošljivost za razne materijale

SASTAV: 100 g otopine sadržava 0,54 g N-dodecilpropan-1,3-diamina i specijalni detergent za instrumente

INDIKACIJE: brza dezinfekcija i čišćenje malih instrumenata i medicinskih proizvoda odmah nakon njihove uporabe; *osobito pogodan za učestalo dnevno čišćenje i dezinfekciju u dentalnoj medicini;* (npr. za svrdla, diamante, gumeni pribor za poliranje, četkice, instrumente za korjenske kanale, ostali sitni stomatološki ili kirurški i nekirurški pribor od raznih materijala i sl.)

baktericid (uklj. <i>M.tuberculosis</i>)*, fungicid**	5 min
virucid (HIV, HBV, HCV)	15 min
vaccinia virus	15 min
BVDV	5 min

* i ** prema DGHM i EN standardu

KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na osnovne sastojke

NAČIN UPORABE: odložite mali instrument ili medicinski proizvod ili pribor izravno u otopinu Triacida-N rfu; ostavite ga uronjenog u otopini 5-15 min, izvadite iz otopine, isperite pod tekućom vodovodnom vodom i pustite da se osuši na staničevini ili gazi; može se koristiti izravno na bušilicama u stomatologiji; ako je instrument jače onečišćen, očistite ga dodatno prije dezinfekcije ANTISEPTICA specijalnim detergentima za instrumente (Instruton ili Instruton E)

NAČIN ČUVANJA: Čuvajte podalje od dohvata djece pri temperaturi do 25 °C.

OPREMA: 2 L, 5 L, 10 L

REGISTRACIJA: Rješenje Agencije za med. proizvode i lijekove HR: UP/I-530-9/08-05/474 od 19. 11.2008.

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH, D-50259 Pulheim, www.antiseptica.com
Proizvedeno sukladno europskim standardima kvalitete ISO 9001 i DIN ISO 13485.
Made in Germany.

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA